

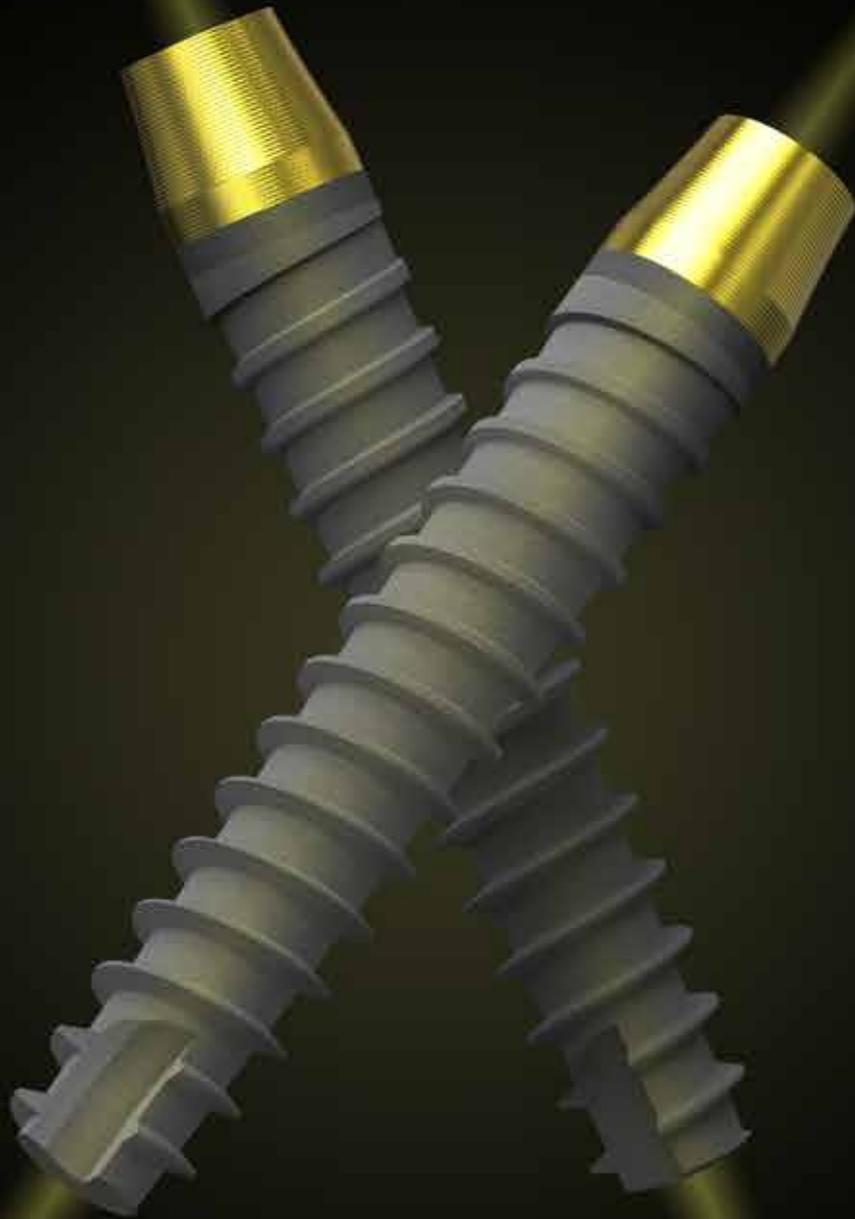


# Prama Nasales y Pterigoideos

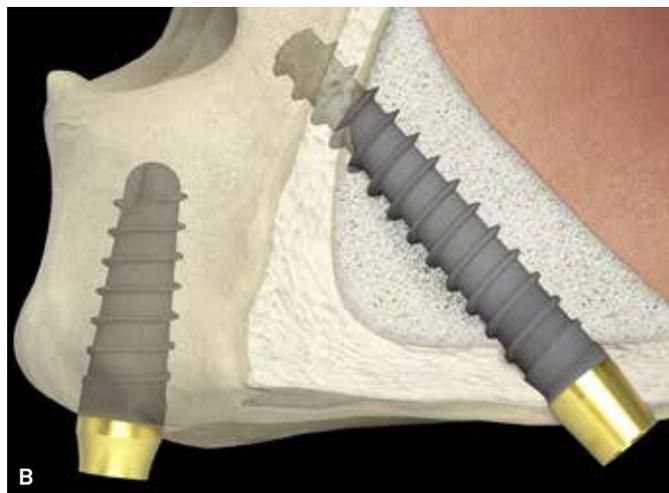

# Prama Nasales y Pterigoideos

En caso de atrofias graves, hay alternativas a la regeneración ósea que pueden aumentar la previsibilidad del tratamiento permitiendo la carga inmediata. La ampliación de la gama Prama permite aprovechar el posicionamiento nasal y pterigoideo para aumentar la estabilidad primaria y la resistencia biomecánica de la rehabilitación. Estas técnicas, que son al alcance de implantólogos de nivel medio-avanzado, son sencillas si combinadas con un serio estudio precirúrgico que pone en evidencia el hueso, la inclinación del implante y las limitaciones anatómicas.

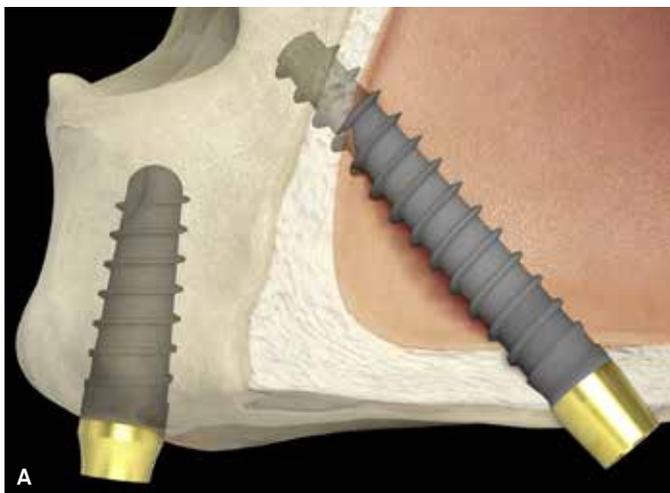

En los casos de atrofias graves del maxilar superior con elevada neumatización anterior del seno maxilar, si se utiliza la técnica clásica All on Prama (bypass del seno maxilar con implantes tiltados) con un cantilever protesico desfavorable, el implante mas distal caeria en una posicion demasiado mesial. En estos casos se puede utilizar el hueso perinasal, casi siempre mantenido en volumen y de excelente calidad. La técnica Prama Nasal prevé dos alternativas, una transnasal con el implante que atraviesa el seno maxilar (imagen A) y una (más correcta y refinada) que prevé un aumento simultáneo de la mucosa sinusal y siguiente injerto de material particulado (imagen B).



En aquellos casos de atrofias aún más agudas, si no se puede proceder con la opción Nasal, se puede utilizar la lámina Pterigoidea del Esfenoide, que es siempre hueso mantenido y de excelente calidad. En presencia de importantes limitaciones anatómicas (arteria maxilar interna, arteria palatina descendente, ganglio esfeno-palatino, etc.), se debería emplear esta técnica con planificación asistida y después de adecuada formación.

## Fresas

Para colocar los implantes Prama Nasales y Pterigoideos se han realizado fresas y topes dedicados, que permiten preparar todas las nuevas longitudes de los implantes.

	FP-200-L-SW	Fresa piloto
	FK250-L-SW	Fresa cónica intermedia
	FK380-L-SW	Fresa final conica
	FK425-L-SW	



Las fresas se pueden utilizar con la pieza de mano SGX-E20R, producida por NSK para los implantes zigomáticos y pterigoideos.

# La Gama



código	L nominal corresponde a la parte tratada ZrTi	versión			L total implante (cuello incluido)
		Short	Standard	Long	
LSL-ZT-380SL-130 LSL-ZT-425SL-130	L. 13			✓	16.80
LSL-ZT-380SL-150 LSL-ZT-425SL-150	L. 15			✓	18.80
LSS-ZT-380SL-180 LSS-ZT-425SL-180	L. 18	✓			20.80
LS-ZT-380SL-180 LS-ZT-425SL-180	L. 18		✓		20.80
LSL-ZT-380SL-180 LSL-ZT-425SL-180	L. 18			✓	21.80
LSS-ZT-380SL-200 LSS-ZT-425SL-200	L. 20	✓			23.80
LSL-ZT-380SL-200 LSL-ZT-425SL-200	L. 20			✓	23.80
LSS-ZT-380SL-220 LSS-ZT-425SL-22	L. 22	✓			25.80
LSL-ZT-380SL-220 LSL-ZT-425SL-220	L. 22			✓	25.80

Prima RF  
(rosca ancha en los  
diámetros)  
ø 3.80 y ø 4.25 mm

Tornillo de cierre L-VT-340 incluido





rev.06-22V01



**Sweden & Martina S.p.A.**

Via Veneto, 10  
35020 Due Carrare (PD), Italy  
Tel. +39.049.9124300  
Fax +39.049.9124290  
info@sweden-martina.com  
www.sweden-martina.com

**Sweden & Martina Mediterranea S.L.**

Sorolla Center, Oficina 801  
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl  
46015-Valencia, Spain  
Tel. +34.96.3525895  
Tel. 900535617  
info.es@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Lda**

Av. Miguel Bombarda, 35  
1050-161 Lisboa, Portugal  
Tel. +351 210509559  
info.pt@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Ltd - United Kingdom**

info.uk@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.**

info.us@sweden-martina.com

Los implantes, los componentes protésicos y los instrumentos quirúrgicos presentes en este catálogo son Dispositivos Médicos y están fabricados por Sweden & Martina S.p.A. Los artículos presentes cumplen con las normas ISO 9001 e ISO 13485 y están registrados con marca CE (Clase I) y CE 0476 (Clase IIA y Clase IIB) de acuerdo con el Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos n. 2017/745. Estos artículos respetan la QSR 21 CFR parte 820 y están aprobados por el FDA.

La empresa Sweden & Martina fabrica dispositivos médicos de acuerdo con las cGMP vigentes en EEUU y en otros países del mundo.



Algunos productos podrían no estar disponibles para todos los mercados.

Todas las marcas presentes en este catálogo son de propiedad de Sweden & Martina S.p.A., salvo aquellos productos que tengan otra indicación.

Estos productos deberán usarse en estudios médicos y en laboratorios, su venta no está dirigida para el paciente.

Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.

Para mayor información sobre los productos, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y potenciales efectos secundarios, remitir a la página web de Sweden & Martina S.p.A.

Todos los contenidos presentes en este catálogo están actualizados. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.